

Recaro Reha kinderstoelen

voor bijzondere kinderen




BCS

Hoogste veiligheid met speciale stoelen voor bijzondere kinderen



BCS Europe

BCS is importeur van Recaro voor Nederland en België. Vanuit onze locatie in Opmeer verzenden wij dagelijks onze producten naar afnemers in beide landen. Speciaal voor de revalidatiesector heeft Recaro in samenwerking met Thomashilfen een programma samengesteld voor kinderen met een beperking. Bijgaande brochure geeft een duidelijk beeld van de mogelijkheden en opties van de verschillende stoelen. Middels deze brochure is het de adviseurs van revalidatiebedrijven mogelijk om geschikt advies uit te brengen aan de potentiële afnemer.

We hebben geprobeerd in deze brochure zo compleet mogelijk te zijn voor wat betreft opties en mogelijkheden. Mocht u desondanks vragen of opmerkingen hebben neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!



Recaro Monza Nova 2 Reha

- 15 tot 50 kg lichaamsgewicht
- voor grote kinderen
- zeer licht



Recaro Sport Reha

- 9 tot 36 kg lichaamsgewicht
- meegroeïend
- met ruststand



Recaro Expert plus Reha

- 9 tot 22 kg lichaamsgewicht
- voor kleine kinderen
- met gepatenteerde snelbevestiging

Bijzonder lichte Recaro kinderstoel met hoge veiligheidsstandaard

15 - 50 kg
lichaamsgewicht



+ internationaal
getest volgens
US-Norm
FMVSS 213



Kinderstoel Recaro Monza Nova Reha 2



Kinderstoel Recaro Monza Nova 2 Reha

- Zeer veilig, ook internationaal (incl. USA) succesvol getest
- Omvangrijke accessoireslijst
- Met draaiplateau voor makkelijk in en uit tillen
- 5-puntsgordel, ook voor grote kinderen
- Minder warm door optimale luchtcirculatie (ACS)
- Standaard voorzien van extra beschermingspelotten en abductieklos
- Volgens laatste ECE normen

Functies



11-voudige
hoogteverstelling



Opblaasbare ondersteuning
voor de nek



Recaro Sound systeem:
Luidsprekers met aansluiting
voor een MP3 speler



Seatfix voor extra stabiliteit
en veiligheid

Accessoires



Draaiplateau met seatfix-
adapter en steunvoet
(detail: stabilisatiebeugel)



Wigkussen onder of in de
stoel voor een grotere zithoek



Zitvlakverlenging



Tafel

Maten en gewichten

Zitdiepte	37 cm (47 cm met zitvlakverlenging)
Zitbreedte	voorkant: 29 cm achterkant: 24 cm (23 cm met wigkussen)
Rughoogte	60 - 77 cm
Buitenmaten (BxHxD)	48 x 66 x 42 cm
Gewicht	ca. 6 kg
Belastbaar tot	50 kg

* Voetensteun en zitvlakverlenging niet in combinatie mogelijk zonder draaiplateau

** Draaiplateau kan niet worden gebruikt in combinatie met de seatfix versie

Producten en accessoires

	Art.-nr.
Recaro Monza Nova 2 Reha	800
Recaro Monza Nova 2 Reha Seatfix (met isofix)	801
Voetensteun, lang* (diepte 18 cm) (inklapbaar en hoekverstelling)	805
Voetensteun, kort* (diepte 12 cm) (inklapbaar en hoekverstelling)	806
Draaiplateau met voetensteunadapter**	820
Optionele extra's voor draaiplateau	
Seatfixadapter (voor het draaiplateau)	818
Stabilisatiebeugel, achter (voor het draaiplateau)	819
Steunvoet, voor (voor het draaiplateau)	817
Rugstabilisatoren (set)	816
Zitvlakverlenging* (+13 cm)	808
Wigkussen in de stoel	809
Wigkussen onder de stoel	810
Tafel	811
Gordelbeschermhuls, grijs (set)	815
Car seat protector	813
Car seat protector, inclusief rugleuning	814
Abductieklos	807
Anti ontsnappingsvest	822+823



1a



1b



2a



2b



3a



3b



4a



4b



5a



5b



5c



5d



6a



6b



7a



7b



8a



8b



8c



8d



9a



9b



10a



10b

5-puntsgordel

Belangrijk:

De 5-puntsgordel dient om het kind in het autozitje vast te zetten, maar beschermt het niet bij een ongeval.

Gebruik altijd de 3-puntsgordel van de wagen om het kind in het zitje vast te zetten.

De lengte van de gordel aanpassen:

Trek aan het losse uiteinde van de gordel om de gordel te verkorten en aan te spannen. Druk de zwarte spangesp wat naar achter en trek de gordel tot op de gewenste lengte om de gordel te verlengen. Indien nodig kan de lengte van de gordel ook worden aangepast met de twee (vergrendelde) gordelogen aan de achterkant van het zitje.

De gordel vergrendelen:

Druk op de rode knop van het slot om de gordel te openen. Haal vervolgens de twee bovenste gordelhouders uit elkaar. Breng de twee bovenste gordelhouders opnieuw samen, steek ze bovenaan in de vergrendeling en druk ze samen tot u een 'klik' hoort om de gordel te vergrendelen. De bekleding van het gordelschild (ritssluiting) is afneembaar en kan tot op 30 °C in de machine worden gewassen. Open ook de ritssluiting van het onderste gordelschild om de bekleding makkelijker te kunnen verwijderen.

Fig. 1a: De gordellengte aanpassen.

Fig. 1b: De gordel vergrendelen ('klik')

Hoofdsteunen

Artikelnr.: 845*

Zet de hoofdsteen van het kinderzitje in de hoogste positie om de kussensteunen makkelijker te kunnen bevestigen. Trek de bekleding van de kussensteunen over de zijkant van de hoofdsteen en maak deze bovenaan met de drukknop vast. Bevestig de kussensteunen onderaan met een elastiek aan de hoofdsteen.

De bekleding is afneembaar (ritssluiting) en kan tot op 30 °C in de machine worden gewassen.

Fig. 2a: De kussensteunen aanbrengen Fig. 2b: Onderaan (a) en bovenaan (b) bevestigen

* Set bestaande uit hoofdsteunen, borststeunen en zijsteunen.

Borststeunen

Artikelnr.: 845*

De borststeunen kunnen op 3 verschillende hoogtes met drukknoppen en klittenband zowel links als rechts aan de rug van het zitje worden bevestigd. Bevestig ze eerst met de drukknop. U kunt de borststeunen nog steviger vastzetten door ze tegen de luszijde van de klittenband op de rug te drukken. De bekleding is afneembaar (ritssluiting) en kan tot op 30 °C in de machine worden gewassen.

Fig. 3a: Drukknop

Fig. 3b: Klittenband

* Set bestaande uit hoofdsteunen, borststeunen en zijsteunen.

Zijsteunen

Artikelnr.: 845*

Zet de rug van het zitje horizontaal om de zijsteunen makkelijker te kunnen bevestigen. Trek de bekleding van de zijsteunen over de zijkanten van de zitting en bevestig ze achteraan met de drukknop. De bekleding is afneembaar (ritssluiting) en kan tot op 30 °C in de machine worden gewassen.

Fig. 4a: Zijsteunen overtrekken

Fig. 4b: Drukknop achteraan

* Set bestaande uit hoofdsteunen, borststeunen en zijsteunen.

Abductieblok

Artikelnr.: 807

Het abductieblok kan in de diepte verschoven worden. Hiervoor moet deze eerst van de loopgordel losgemaakt worden. Haal het eindgedeelte van de gordelband van het losse eind van de loopgordel weg en rijg de gordel uit de schuifgesp en het gordelslot. Trek het abductieblok omhoog van de loopgordel af. Rijg de schuifgesp en het gordelslot weer op de loopgordel en zet het losse eind van de gordel aan het eindgedeelte van de gordelband vast. Zet het abductieblok naar behoefte op het daarvoor bedoelde vasthaakpunt op het zitvlak van de stoel.

De bekleding is afneembaar (met behulp van ritssluiting) en kan tot 30°C in de wasmachine gewassen worden. Om de bekleding eraf te kunnen nemen moet het abductieblok eerst van de loopgordel losgemaakt worden zoals hierboven beschreven is.

Fig. 5a: Eindgedeelte van de gordelband

Fig. 5b: Eindgedeelte van de gordelband weghalen

Fig. 5c: Schuifgesp en gordelslot eruit trekken

Fig. 5d: Abductieblok wegnemen

Draaiplateau met voetensteunadapter (accessoires)

Artikelnr.: 820

Neem onze aparte montagehandleiding in acht! (zie pagina 19)

Seatfixadapter (voor het draaiplateau) (accessoires)

Artikelnr.: 818

Neem onze aparte montagehandleiding in acht! (zie pagina 19)

Stabilisatiebeugel, achter (voor het draaiplateau) (accessoires)

Artikelnr.: 819

Neem onze aparte montagehandleiding in acht! (zie pagina 19)

Steunvoet, voor (voor het draaiplateau) (accessoires)

Artikelnr.: 817

Neem onze aparte montagehandleiding in acht! (zie pagina 19)

Voetensteun, kort 12 cm [accessoires]	Artikelnr.: 806
Voetensteun, lang 18 cm [accessoires]	Artikelnr.: 805

Verwijder beide afdekkappen onderaan op de voorkant van de zitting voor u de voetensteun monteert. Druk de vergrendelveren achteraan de schuifstangen in en schuif de buizen tot aan de aanslag in de openingen. Om de voetensteun op de bodem van het voertuig te stabiliseren, past u de hoogte van de steunstangen zo aan (in- of uitdraaien), zodat de stangen de vloer van uw voertuig raken. Bevestig vervolgens de steunstangen met contramoeren door de stervormige handgreep, om te vermijden dat de stangen per ongeluk losdraaien. Draai hiervoor de schroeven van de stervormige greep zo ver mogelijk omhoog en draai ze stevig vast.

Belangrijk:

Bij gebruik van het draaiplateau wordt de voetensteun in de voetensteunadapter opgenomen. Borg de voetensteun in dat geval met de bijgeleverde stervormige schroeven zodat hij er niet kan uitvallen. Gebruik hiervoor een metalen blok met schroefdraad, aan de linker buis van de voetensteunadapter.

Lengte onderbeen:

U kunt de lengte van het onderbeen instellen door de hoogte van de voetensteun te verstellen. Draai hiervoor de twee buitenste kartelmoeren los en draai ze vervolgens opnieuw vast.

Hoekverstelling voetensteun:

Draai de 4 schroeven rechts en links aan de onderkant van de voetensteun los om de gewenste voethoek met de rails in te stellen. Draai vervolgens de schroeven opnieuw vast.

Belangrijk: U kunt de voetensteun niet in combinatie met de zitvlakverlenging gebruiken zonder draaiplateau.

Fig. 6a: Afdekkappen + steun insteken **Fig. 6b:** Hoogteregeling voertuig

Wigkussen onder de stoel [accessoires]	Artikelnr.: 810
--	-----------------

Het wigkussen wordt in het midden onder het autozitje geplaatst, met de hoge kant vooraan zodat het kind zich in optimale rustpositie bevindt. De bekleding is afneembaar (ritssluiting) en kan tot op 30 °C in de machine worden gewassen.

Belangrijk:

Door het gebruik van het wigkussen in combinatie met het draaiplateau wordt de werking ervan aanzienlijk beperkt. Daarom is het raadzaam om het wigkussen en het draaiplateau niet samen te gebruiken.

Fig. 7a: De stoel op het wigkussen plaatsen **Fig. 7b:** Eindpositie

Wigkussen in de stoel [accessoires]	Artikelnr.: 809
-------------------------------------	-----------------

Het wigkussen voor in de stoel kan in 3 verschillende posities op de stoel worden bevestigd:

1. Voor een actieve zithouding: leg het wigkussen op de zitting met de hoge kant naar achter en bevestig met de klittenband.
2. Voor een passievere zithouding: kleef het wigkussen met de platte kant naar achter.
3. Voor een verkorte zitdiepte of voor een grotere zithoek: plaats het wigkussen rechtop met de brede kant naar onder en bevestig met klittenband achteraan op de zitting.

Bevestig de twee buitenste kussentjes voor extra steun met klittenband aan de zijkanten.

De bekleding is afneembaar (ritssluiting) en kan tot op 30 °C in de machine worden gewassen.

Fig. 8a: Actief **Fig. 8b:** Passief **Fig. 8c:** Rug **Fig. 8d:** Met zijkussentjes

Zitvlakverlenging + 13 cm [accessoires]	Artikelnr.: 808
---	-----------------

Verwijder de twee afdekkappen onderaan op de voorkant van de zitting voor u de zitvlakverlenging monteert. Druk de veersluitingen achteraan op de uiteinden van de schuifstangen in en schuif de buizen tot aan de aanslag in de openingen.

Belangrijk:

U kunt de zitvlakverlening niet in combinatie met de voetensteun zonder draaiplateau gebruiken.

De bekleding is afneembaar en kan tot op 30 °C in de machine worden gewassen.

Fig. 9a: Afdekkappen verwijderen **Fig. 9b:** Veersluitingen indrukken

Tafel [accessoires]	Artikelnr.: 811
---------------------	-----------------

Schuif de tafel op de beide zijstukken van het zitoppervlak. De tafel wordt aan beide kanten met telkens twee klittenbanden bevestigd. Trek de klittenbanden van de tafel door de kunststof ringen op de zitting / rug (bekkengordel).

De bekleding is afneembaar (ritssluiting) en kan tot op 30 °C in de machine worden gewassen.

Fig. 10a: De tafel monteren **Fig. 10b:** De gordel aan de zitting bevestigen

Rugstabilisatoren [accessoires]	Artikelnr.: 816
---------------------------------	-----------------

Plaats de rugstabilisatoren zodanig dat de beide ribben naar beneden wijzen (afb. 11a). Druk de rugleuning hierbij iets in de richting van de stoel. Bevestig de rugstabilisatoren met de bijgeleverde lenskopschroeven (afb. 11b) (2 stuks per zijde) met een 3 mm-inbussleutel.

Opmerking: let op dat de schroeven niet te vast worden aangedraaid om te vermijden dat de hollewandankers doordraaien!

Recaro Monza Nova 2 Reha: Draaiplateau [accessoires]	Artikelnr.: 820
--	-----------------

Om de Recaro Monza Nova 2 Reha te verbinden met het draaiplateau, moet er eerst een adapterplaat aan de stoel worden bevestigd. Verwijder daartoe de 4 schroeven (Torx T20) die onder in de stoel zijn geschroefd. Houdt de adapterplaat zodanig tegen de stoel dat de schroefgaten met de verzonken boorgaten naar onder liggen, en het brede deel van de adapterplaat aan de achterzijde aansluit (**afb. 2a**). Schroef de plaat met de bijgeleverde lange schroeven aan de stoel vast (**afb 2b**).

Let op:

Wanneer u gebruik wilt maken van het draaiplateau, dient u tevens een set rugstabilisatoren (Art 816, **afb.2d**) aan te schaffen. Hiermee voorkomt u het ongewild achterover klappen van de rugleuning wanneer u het kind in de stoel plaatst.

Teneinde de stoel te bevestigen op de draaiplaat plaatst u de stoel met de adapterplaat voorover gekiept aan de voorzijde (daar waar de handgreep zit] van de stoel en kantelt deze behoedzaam terug, zodat de stoel op het klitteband van de draaiplaat (**afb 2.c**) komt. Om de stoel te verwijderen kantelt u de stoel van achter naar voren totdat deze loslaat van het klitteband.

De draaiplaat is voorbereid voor montage rechtsachter in de auto. Mocht u deze links willen plaatsen, dan dient u het draaipunt naar de andere zijde van het draaiplateau te brengen. Dit gebeurt door de inbus schroef te verwijderen en aan de andere zijde weer vast te zetten. Bij het terug draaien in de rijrichting hoort u een klik als de stoel weer in de juiste positie staat. Let op: dit is slechts een auditief signaal en geen vergrendeling!

Aan het draaiplateau kunnen de voetensteun en /of de seatfixadapter/stabilisatiebeugel worden bevestigd



2a Monza



2b Monza



2c Monza



2d Monza

Recaro kinderstoel, meegroeiend met hoogste veiligheidsstandaard

9 - 36 kg
lichaamsgewicht



Kinderstoel Recaro Sport Reha

Kinderstoel Recaro Sport Reha

- Eenvoudig in- en uitnemen door middel van het draaiplateau
- Met ingebouwde zitneiging voor rust- en slaappositie
- Standaard uitgerust met extra pelotten
- 5-puntsfixatie met handige verstelling
- Volgens de laatste ECE normen

Functies



Ruststand eenvoudig en snel instelbaar



Hoofdsteun 3-voudig verstelbaar



5-puntsfixatie



Praktische draaggreep

Accessoires



Draaiplateau met seatfix-adapter en steunvoet (detail: stabilisatiebeugel)



Voetensteun



Wigkussen



Tafel

Maten en gewichten

Zitdiepte	31 cm (28 cm met zitpelotten)
Zitbreedte	voorkant: 33 cm (27 cm met zitpelotten)
	achterkant: 30 cm (24 cm met zitpelotten)
Rughoogte	55 - 65 cm
Buitenmaten (BxHxD)	47 x 63 x 52 cm
Gewicht	ca. 8 kg
Belastbaar tot	36 kg

* Bij gebruik van de voetensteun zonder draaiplateau moet altijd de adapter besteld worden (821)

Producten en accessoires

	Art.-nr.
Recaro Sport Reha	880
Voetensteun, kort* (diepte 12 cm) (inklapbaar en hoekverstelling)	806
Draaiplateau met voetensteunadapter**	820
Optionele extra's voor draaiplateau voor extra stabiliteit	
Seatfixadapter (voor het draaiplateau)	818
Stabilisatiebeugel, achter (voor het draaiplateau)	819
Steunvoet, voor (voor het draaiplateau)	817
Wigkussen onder de stoel	810
Tafel	885
Gordelverlenging (+20 cm)	E91033
Car seat protector	813
Car seat protector, inclusief rugleuning	814
Voetensteunadapter	821
Anti ontsnappingsvest	822+823



1a



1b



2a



2b



3a



3b



4a



4b



5a



5b



6a



6b



7a



7b



8a



8b

Algemeen

Belangrijk:

De 5-puntsgordel die in het kinderzitje is geïntegreerd, mag alleen in ECE-groep 1 worden gebruikt. Een voorwaarde hiervoor is dat het autozitje eerst met de in het voertuig aanwezige 3-puntsgordel wordt bevestigd.

Geschikt voor een lichaamsgewicht tot 36 kg:

Het autozitje Recaro Sport Reha heeft de vereisten van ECE R 44/04 in een belastingstest bij Dekra (Dresden) met succes doorstaan. De Recaro Sport Reha is daarom als ruggensteun voor speciale eisen 'S' toegestaan.

5-puntsgordel (groep 1)

Belangrijk:

De beschikbare 5-puntsgordel is reeds in het zitje gemonteerd. Voor de Reha-versie werd hij met extra gordelschildbekleding uitgerust. Meer informatie over het gebruik van de gordel vindt u in de Recaro-gebruiksaanwijzing die bij het autozitje is geleverd.

De lengte van de gordel aanpassen:

Hef het zijkussen van de zitting omhoog en maak de stoffen lip met de klittenband los. Nu ziet u de centrale gordelversteller die in de zitkuip zit verzonken. Om de gordellengte aan te passen, drukt u de hendel omlaag en stelt u de gordel in door aan de gordelband onderaan te trekken (verkorten), of door de beide gordels naar voor te trekken (verlengen).

De gordel vergrendelen:

Druk op de rode knop van het slot om de gordel te openen. Haal vervolgens de twee bovenste gordelhouders uit elkaar. Breng de twee bovenste gordelhouders opnieuw samen, steek ze bovenaan in de vergrendeling en druk ze samen tot u een 'klik' hoort om de gordel te vergrendelen. De bekleding van de gordelschild (ritssluiting) is afneembaar en kan tot op 30 °C in de machine worden gewassen. Open ook de ritssluiting van het onderste gordelschild om de bekleding makkelijker te kunnen verwijderen.

Fig. 1a: De gordellengte aanpassen Fig. 1b: De gordel vergrendelen ('klik')



Hoofddeunkussen

Trek de bekleding van het kussen zo strak mogelijk over de zijanten van de hoofddeun en bevestig deze bovenaan de schroeven.

Fig. 2a: Het hoofddeunkussen over de zijant trekken Fig. 2b: Bevestiging aan schroef

Borststeun

Om de borststeun aan te brengen, plaatst u deze los in de zitting en steekt u vervolgens beide klittenbanden achter het rugkussen. Bevestig de klittenbandstroken achter het kussen aan elkaar. De bekleding is afneembaar en kan tot op 30 °C in de machine worden gewassen.

Fig. 3a: Het kussen op de zitting plaatsen Fig. 3b: Klittenbandbevestiging

Zijsteunkussen van de zitting

Verwijder eerst het gordelschild van de gordelvergrendeling. Om het zijsteunkussen van de zitting aan te brengen, plaatst u dit op het zitoppervlak en steekt u de gordelvergrendeling door de daarvoor voorziene gleuf in het kussen. Maak het kussen met de beide drukknoppen vast achteraan op het zitoppervlak. Bevestig het gordelschild opnieuw aan de gordelvergrendeling. De bekleding is afneembaar en kan tot op 30 °C in de machine worden gewassen.

Fig. 4a: Het kussen op de zitting plaatsen / gordelvergrendeling door gleuf steken Fig. 4b: Aan drukknoppen bevestigen

Voetensteunadapter (accessoires)

Artikelnr.: 821

Reinig eerst het kunststof oppervlak onderaan de zitting met een in de handel verkrijgbaar reinigingsmiddel (bv. water en afwasmiddel), tot het helemaal vetvrij is. Verwijder nu de klittenband van de adapterplaat en bevestig hem onderaan de zitting. De klittenband blijft op de adapterplaat zitten. Plaats de zitting nu in een hoek van 90° vooraan op de adapter (greep van de adapter hangt naar voren) en kantel de zitting op de adapter zodat het zitoppervlak vastgeklit wordt. Voetensteun: De voetensteun wordt met de adapter aangebracht.

Fig. 5a: Het klittenband op de zitting bevestigen Fig. 5b: De zitting op de adapter plaatsen

Voetensteun, kort 12 cm (accessoires)

Artikelnr.: 806

Druk de grendelveren achteraan de schuifstangen in en schuif de buizen tot aan de aanslag in de openingen.

Om de voetensteun op de bodem van het voertuig te stabiliseren, past u de hoogte van de steunstangen zo aan (in- of uitdraaien), zodat de stangen de vloer van uw voertuig raken. Bevestig vervolgens de steunstangen met contramoeren door de stervormige handgreep, om te vermijden dat de stangen per ongeluk losdraaien. Draai hiervoor de schroeven van de stervormige greep zo ver mogelijk omhoog en draai ze stevig vast.

Lengte onderbeen:

U kunt de lengte van het onderbeen instellen door de hoogte van de voetensteun te verstellen. Draai hiervoor de twee buitenste kartelmoeren los en draai ze vervolgens opnieuw vast.

Hoekverstelling voetensteun:

Draai de 4 schroeven rechts en links aan de onderkant van de voetensteun los om de gewenste voethoek met de rails in te stellen. Draai vervolgens de schroeven opnieuw vast.

Tip: Borg de voetensteun met de bijgeleverde stervormige schroeven zodat ze er niet kunnen uitvallen. Gebruik hiervoor het metalen blok met schroefdraad, aan de linker buis van de voetensteunadapter.

Fig. 6a: De steunen in de stoel steken Fig. 6b: Hoogteregeling in voertuig

Draaiplateau met voetensteunadapter (accessoires)

Artikelnr.: 820

Neem onze aparte montagehandleiding in acht! (zie pagina 19)

Seatfixadapter (voor draaiplateau) (accessoires)

Artikelnr.: 818

Neem onze aparte montagehandleiding in acht! (zie pagina 19)

Stabilisatiebeugel, achter (voor draaiplateau) (accessoires)

Artikelnr.: 819

Neem onze aparte montagehandleiding in acht! (zie pagina 19)

Steunvoet, voor (voor draaiplateau) (accessoires)

Artikelnr.: 817

Neem onze aparte montagehandleiding in acht! (zie pagina 19)

Wigkussen onder de stoel (accessoires)

Artikelnr.: 810

Het wigkussen wordt in het midden onder het autozitje geplaatst, met de hoge kant vooraan zodat het kind zich in optimale rustpositie bevindt. De bekleding is afneembaar (ritssluiting) en kan tot op 30 °C in de machine worden gewassen.

Belangrijk:

Door het gebruik van het wigkussen in combinatie met het draaiplateau wordt de werking ervan aanzienlijk beperkt. Daarom is het raadzaam om het wigkussen en het draaiplateau niet samen te gebruiken.

Fig. 7a: De stoel op het wigkussen plaatsen Fig. 7b: Eindpositie

Tafel (accessoires)

Artikelnr.: 811

Monteer eerst de zijstukken van de tafel door deze over de ronde hoekpunten van de zitting te trekken. De kant met de langste stof moet daarbij telkens naar buiten steken. Bevestig vervolgens de stof op de wieltes om de zitting te verstellen met de daarvoor voorziene openingen voor de zijstukken. De stof die onderaan uitsteekt wordt nu onder het zitkussen geklemd.

Bevestig vervolgens de tafel op de klittenband van de zijstukken.

Tip: Verwijder bij gebruik van de tafel eventueel het gordelschildbekleding om plaats te besparen.

De bekleding is afneembaar en kan tot op 30 °C in de machine worden gewassen.

Fig. 8a: De zijstukken monteren

Fig. 8b: De tafel plaatsen

Recaro kinderstoel, met hoogste veiligheidsstandaard voor kleinere kinderen

9 - 22 kg
lichaamsgewicht



Kinderstoel Recaro Expert Plus Reha

Kinderstoel Recaro Expert Plus Reha

- Gepatenteerde snelbevestiging
- Met geïntegreerde rust- en slaappositie
- Standaard uitgerust met extra pelotten
- Handgreep voor eenvoudig transport
- 5-puntsfixatie met handige verstelling
- Volgens de laatste ECE normen

Funcities



Gepatenteerde snelbevestiging in het voertuig met de 3-punts gordel



Geïntegreerde 5-puntsfixatie



Eenvoudige bediening rust- en slaapstand

Accessoires



Voetensteun en adapter



Tafel



Wigkussen onder de stoel

Maten en gewichten

Zitdiepte	29 cm (26 cm met zitpelotten)
Zitbreedte	voorkant: 29 cm (22 cm met zitpelotten)
	achterkant: 28 cm (22 cm met zitpelotten)
Rughoogte	55 cm
Buitenmaten (BxHxD)	43 x 67 x 56 cm
Gewicht	ca. 11 kg
Belastbaar tot	22 kg

* Bij gebruik van de voetensteun moet altijd de adapter besteld worden

Producten en accessoires

	Art.-nr.
Recaro Expert Plus Reha	860
Voetensteun, kort* (diepte 12 cm) (inklapbaar en hoekverstelling)	806
Adapter voor voetensteun	821
Wigkussen onder de stoel	810
Tafel	811
Car seat protector	813
Car seat protector, inclusief rugleuning	814
Anti ontsnapingsvest	822+823



1a



1b



2a



2b



3a



3b



4a



4b



5a



5b



6a



6b



7a



7b



8a



8b

5-puntsgordel

Belangrijk:

De 5-puntsgordel dient om het kind in het autozitje vast te zetten. Gebruik altijd de 3-puntsgordel van de wagen om het zitje overeenkomstig de gebruiksinstructies in de wagen vast te zetten.

De beschikbare 5-puntsgordel is reeds in het zitje gemonteerd. Voor de Reha-versie werd hij met extra gordelschildbekleding uitgerust. Meer informatie over het gebruik van de gordel vindt u in de Recaro-gebruiksaanwijzing die bij het autozitje is geleverd.

De lengte van de gordel aanpassen: Hef het zijkussen van de zitting omhoog en maak de stoffen lip met de klittenband los. Nu ziet u de centrale gordelversteller die in de zitkuip zit verzonken. Om de gordellengte aan te passen, drukt u de hendel omlaag en stelt u de gordel in door aan de gordelband onderaan te trekken (verkorten), of door de beide gordels naar voor te trekken (verlengen).

De gordel vergrendelen: Druk op de rode knop van het slot om de gordel te openen. Haal vervolgens de twee bovenste gordelhouders uit elkaar. Breng de twee bovenste gordelhouders opnieuw samen, steek ze bovenaan in de vergrendeling en druk ze samen tot u een 'klik' hoort om de gordel te vergrendelen. De bekleding van het gordelschild (ritssluiting) is afneembaar en kan tot op 30 °C in de machine worden gewassen. Open ook de ritssluiting van het onderste gordelschild om de bekleding makkelijker te kunnen verwijderen.

Fig. 1a: De gordellengte aanpassen **Fig. 1b:** De gordel vergrendelen ('klik')

Hoofdsteenkussen (in hoogte verstelbaar)

Om het hoofdsteenkussen aan te brengen, plaatst u dit los bovenop de zitrug en steekt u beide gordels en de lussen van de gordelbekleding door de daarvoor voorziene gleuven naar achter, waar u ze bevestigt. Bevestig hiervoor de twee lussen van de gordelbekleding aan de metalen stang en de gordel aan de metalen haak, die aan de band voor de gordelinstelling is bevestigd.

De hoogteregeling gebeurt in drie stappen samen met de schoudergordel.

Om de gordel in de hoogte te verstellen, trekt u de stang aan de rugzijde uit de inkeping en plaatst u deze omhoog of omlaag. Druk de stang stevig vast in de inkepingen, zodat ze wordt vergrendeld. Trek ook de rubberen band mee. Stel de hoofdsteen overeenkomstig in.

Tip: Trek om de gordel te verstellen niet aan de gordelbekleding op schouderhoogte, maar alleen aan de eigenlijke gordels.

De bekleding is afneembaar en kan tot op 30 °C in de machine worden gewassen.

Fig. 2a: De hoofdsteen bevestigen

Fig. 2b: De rug in de hoogte verstellen

Borststeen

Om de borststeen aan te brengen, plaatst u deze los in het zitje en breng vervolgens beide klittenbanden achter de rugsteen, waar u ze achter de steun (niet achter het schuimplastic) vastkleeft. U kunt de borststeen naar keuze met de smalle of de brede kant omhoog gebruiken. De bekleding is afneembaar en kan tot op 30 °C in de machine worden gewassen.

Fig. 3a: De zit positioneren

Fig. 3b: Klittenbandbevestiging

Zijsteun van de zitting

Verwijder eerst het gordelschild van de gordelvergrendeling. Om de zijsteunen van de zitting aan te brengen, plaatst u deze los in de zitting en steekt u de gordelvergrendeling door de daarvoor voorziene gleuf in het kussen. Steek dan beide klittenbanden onder het zitkussen. Kleef de banden achter het kussen (niet achter het schuimplastic) aan elkaar. Bevestig het gordelschild opnieuw aan de gordelvergrendeling.

Tip: De zijsteun van de zitting kan ook als borststeen worden gebruikt.

De bekleding is afneembaar en kan tot op 30 °C in de machine worden gewassen.

Fig. 4a: De steun op de zitting plaatsen

Fig. 4b: Klittenbandbevestiging

Voetensteunadapter (accessoires)

Artikelnr.: 821

Reinig eerst het kunststof oppervlak onderaan de zit met een in de handel verkrijgbaar reinigingsmiddel (bv. water en afwasmiddel), tot het helemaal vetvrij is. Verwijder nu de klittenband (lusjes) van de adapterplaat en bevestig hem onderaan de zitting. Het klittenband blijft op de adapterplaat zitten. Plaats de zit nu in een hoek van 90° vooraan op de adapter (greep van de adapter hangt naar voren) en kantel de zit op de adapter zodat het zitoppervlak vastgekleit wordt.

Voetensteun: De voetensteun wordt aan de adapter aangebracht.

Fig. 5a: De klittenband op de zitting bevestigen

Fig. 5b: De zitting op de adapter plaatsen

Voetensteun, kort 12 cm (accessoires)

Artikelnr.: 806

Druk de grendelveren achteraan de schuifstangen in en schuif de buizen tot aan de aanslag in de openingen.

Om de voetensteun op de bodem van het voertuig te stabiliseren, past u de hoogte van de steunstangen zo aan (in- of uitdraaien), zodat de stangen de vloer van uw voertuig raken. Bevestig vervolgens de steunstangen met contramoeren door de stervormige handgreep, om te vermijden dat de stangen per ongeluk losdraaien. Draai hiervoor de schroeven van de stervormige greep zo ver mogelijk omhoog en draai ze stevig vast.

Lengte onderbeen:

U kunt de lengte van het onderbeen instellen door de hoogte van de voetensteun te verstellen. Draai hiervoor de twee buitenste kartelmoeren los en draai ze vervolgens opnieuw vast.

Hoekverstelling voetensteun: Draai de 4 schroeven rechts en links aan de onderkant van de voetensteun los om de gewenste voethoek met de rails in te stellen. Draai vervolgens de schroeven opnieuw vast.

Tip: Borg de voetensteun met de bijgeleverde stervormige schroeven zodat ze er niet kunnen uitvallen. Gebruik hiervoor het metalen blok met schroefdraad, aan de linker buis van de voetensteunadapter.

Fig. 6a: De steunen in de stoel steken

Fig. 6b: Hoogteregeling voertuig

Wigkussen onder de stoel (accessoires)

Artikelnr.: 810

Het wigkussen wordt in het midden onder het autozitje geplaatst, met de hoge kant vooraan zodat het kind zich in optimale rustpositie bevindt. De bekleding is afneembaar (ritssluiting) en kan tot op 30 °C in de machine worden gewassen.

Fig. 7a: De zit op het wigkussen plaatsen

Fig. 7b: Eindpositie

Tafel (accessoires)

Artikelnr.: 811

Monteer eerst de zijstukken van de tafel door deze over de ronde hoekpunten van de zitting te trekken. Op de zijstukken van de tafel vindt u drie bevestigingsknoppen waaraan de stof wordt vastgemaakt. Van de bevestigingsknoppen vindt u er twee aan de binnenkant (vooraan en achteraan, tamelijk ver onderaan) en aan de buitenkant.

Bevestig vervolgens de tafel op de klittenband van de zijstukken.

Tip: Verwijder bij gebruik van de tafel eventueel het gordelschildbekleding om plaats te besparen.

De bekleding is afneembaar en kan tot op 30 °C in de machine worden gewassen.

Fig. 8a: De zijstukken monteren

Fig. 8b: De tafel plaatsen

Recaro Sport Reha: Draaiplateau met voetensteunadapter (accessoires)

Artikelnr.: 820

Eerst moeten de kleefvlakken worden gereinigd. Leg het kinderstoeltje op de achterzijde. Reinig de kunststofoppervlakken aan de onderzijde van het stoeltje zorgvuldig met behulp van gebruikelijke middelen (bijv. water met afwasmiddel), zodat de oppervlakken volkomen vetvrij zijn. Trek nu de bovenste twee klittenbanden (zacht aanvoelend) van het draaiplateau en verwijder de witte kleefafdekking. Plak vervolgens het zelfklevende klittenband rechts en links zodanig op de gereinigde onderzijde van het stoeltje dat het klittenband aan de voorzijde vlak afsluit (aan de achterzijde wordt het klittenband tot aan het einde geplakt (niet inkorten).

Druk het klittenband overal goed vast en laat het kleefmiddel 5 minuten vasthechten **(afb. 1a)**. De klittenbanden (hard aanvoelend) blijven op het draaiplateau. Positioneer het stoeltje nu vlak afsluitend in een hoek van 90° voor op het draaiplateau [de greep van het draaiplateau wijst naar voren] en kantel het zitje naar achteren op het draaiplateau, zodat het stoeltje vastgeklit is. Als u het stoeltje wilt verwijderen, trekt u het altijd van achteren naar voren van het draaiplateau door het dienovereenkomstig te kantelen **(afb. 1 b)**.

Voor de positionering van het kinderstoeltje is het draaiplateau rechts op de achterbank in de auto gemonteerd (veilig in- en uitstappen van het kind vanaf het trottoir in landen met rechtsverkeer). Als het kinderstoeltje links op de achterbank wordt gepositioneerd, moet het draaipunt van de draaischijf worden veranderd. Hiervoor moet slechts de inbusschroef worden verplaatst.

Opmerking: het hoorbaar vastklikken van het draaiplateau is alleen bedoeld als oriëntatiehulp voor de rechte positionering van het stoeltje op het draaiplateau.

Transport: om het stoeltje met het draaiplateau te kunnen transporteren, grijpt u het draaiplateau met een hand vast aan de greep en houdt u de rug van het stoeltje vast met de andere hand. Om gewichtsredenen kunnen het stoeltje en het draaiplateau ook gescheiden van elkaar worden getransporteerd.

Voetensteun: de voetensteun wordt door middel van een adapter (buissteunen) aan de onderzijde van het draaiplateau aangebracht.

Seatfixadapters (voor draaiplateau) (accessoires)

Artikelnr.: 818

Opmerking: voorwaarde voor het gebruik van de seatfix is een voorhanden ISOFIX-aansluiting in de auto (meestal aan de passagierskant op de achterbank). Controleer dit a.u.b. vóór de koop! Draai eerst de achterste borgschroef van de buissteun onder het draaiplateau los (de plaat is hier afgerond) **(afb. 2a)**. Plaats de seatfix vervolgens op de betreffende zitplaats in de auto. De boringen aan de uiteinden van de geleidebuizen moeten naar beneden (naar de kinderstoel) wijzen. Leid de seatfix (met gele vergrendelingen) in de Isofix-ankers van de auto. Controleer vervolgens of de adapters correct zijn vastgeklit.

Steek nu de seatfix in de achterste opname van het draaiplateau (plaat is hier afgerond) met de losgedraaide borgschroef **(afb. 2b)**. Pas de uitschuiflengte van de seatfixaansluiting zodanig aan uw auto aan dat de voorkant van het draaiplateau naar mogelijkheid aansluit met de stoelrand. Til het draaiplateau hiervoor aan de voorzijde voorzichtig zo ver op dat u de achterste borgschroef kunt bereiken en correct kunt vastdraaien.

De schroef moet daarbij pasnauwkeurig in de veiligheidsboring van de geleidebuis van het draaiplateau grijpen **(afb. 2c)**. **Opmerking:** bij gebruik van de seatfix moet het draaiplateau en het stoeltje om veiligheidsredenen principieel naar voor op de bodem van de auto worden gesteund. Gebruik hiervoor de voetensteunen (art.-nr. 805 resp. 806) of de steunvoet (art.-nr. 817).

Belangrijk: De seatfixaansluiting voor het draaiplateau zijn bedoeld om de kinderstoel te positioneren, en vervangen niet de veiligheidsgordel. Zet uw kind in het stoeltje altijd vast met de 3-puntsgordel van de auto, volgens beschrijving in de handleiding.

Steunvoet, voor (voor draaiplateau) (accessoires)

Artikelnr.: 817

Opmerking: door het gebruik van de steunvoet wordt de veiligheid van de complete kinderstoel verhoogd. de steunvoet moet worden gebruikt als het draaiplateau met de seatfixadapter gestabiliseerd wordt en geen voetensteun voorhanden is. Draai eerst de voorste borgschroef van de buissteun onder het draaiplateau (naast de handgreep) los **(afb. 3a)**. Druk de vergrendelveren in de achterste uiteinden van de geleidebuizen en steek de geleidebuizen van de steunvoet zo ver mogelijk in de dienovereenkomstige opname onder het draaiplateau **(afb. 3b)**. Draai nu de borgschroef onder het draaiplateau weer vast. De schroef moet daarbij nauwkeurig in de veiligheidsboring van de geleidebuis van de geleidebuis grijpen. Voor de stabilisering van de steunvoet past u nu de draadstangen van de steunvoet aan de hoogte van uw autobodem aan. Draai hiervoor eerst de bevestigingsring aan het bovenste uiteinde van de draadstang los en stel vervolgens de correcte hoogte in (bodemcontact met de auto) door aan de onderste rubbersteun van de draadstang te draaien. Let op dat u de draadstangen niet te ver uitdraait – het draaiplateau of de kinderstoel moeten altijd recht op de autostoel steunen! Zet de draadstang nu vast door de bovenste bevestigingsring naar boven te draaien. Zo voorkomt u perongeluk uitdraaien van de draadstangen **(afb. 3c)**.

Stabilisatiebeugel, achter (voor draaiplateau) (accessoires)

Artikelnr.: 819

Draai eerst de achterste borgschroef van de buissteun onder het draaiplateau los. Steek de stabilisatiebeugel op de afgeronde achterste zijde in de daar voorhanden buissteunen **(afb. 4a)**. Leg nu het draaiplateau zodanig op de stoel dat de stabilisatiebeugel zo ver mogelijk tussen de rug en de stoelzitting wordt geschoven **(afb. 4b)**. Pas vervolgens de uitschuiflengte van de stabilisatiebeugel zodanig aan uw auto aan dat de voorkant van het draaiplateau naar mogelijkheid aansluit met de stoelrand. Draai het draaiplateau nu voorzichtig om en draai de borgschroef correct vast. De schroef moet pasnauwkeurig in een van de veiligheidsboringen van de geleidebuizen van de stabilisatiebeugel grijpen.

Opmerking: de stabilisatiebeugel kan aan twee zijden worden gebruikt **(afb. 4c)**. Probeer in uw auto uit, met welke zijde u de grootste stabiliteit voor het draaiplateau bereikt.

Anti ontsnappingsvest (accessoires)

Artikelnr.: 822 + 823

Met het anti ontsnappingsvest verhindert u het kind om te ontsnappen tussen de gordels en de stoel. **(afb. 5)**



1a



1b



2a



2b



2c



3a



3b



3c



4a



4b



4c



5



Adres: De Veken 200 B003
1716 KJ Opmeer

Telefoon: +31 (0)226 745010
Fax: +31 (0)226 745015
Website: www.bcs-europe.nl
Email: info@bcs-europe.nl